


NOVINKA !

NOVÉ RUČNĚ TVAROVATELNÉ PLASTOVÉ PODKOVY- PLASTOVÉ PODKOVY ESPRIT

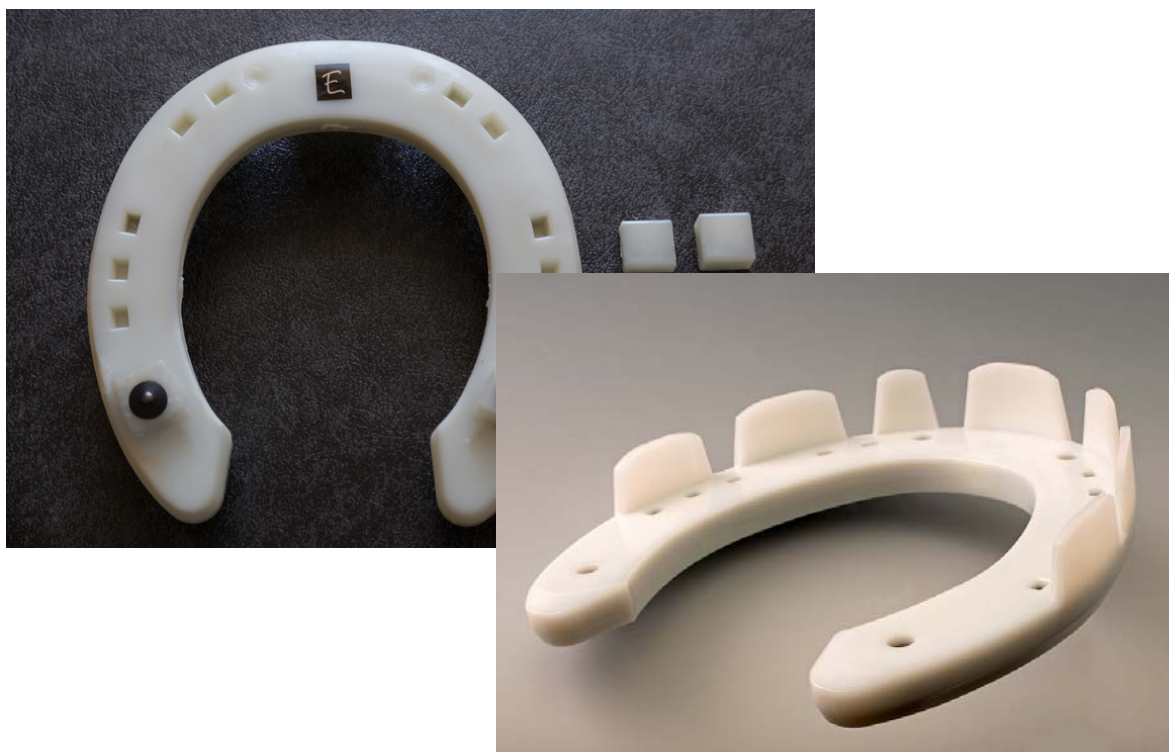

Speciálně vyvinutý plast použitý pro výrobu podkov umožňuje snadno natvarovat a napasovat podkovu na kopyto bez použití kovářiny a kladiva.

Před vlastním tvarováním je třeba podkovu namočit na cca 40 sekund do vařící vody. **POZOR:** čapky musí nad vodou vyčnívat – neměly by se namočit.

Tímto postupem podkova „změkne“ a může se natvarovat do jakéhokoliv požadovaného tvaru.

Po natvarování podkova do několika minut opět dokonale ztvrdne a může se jednoduše přibít nebo nalepit.

Pokud je potřeba po ztvrdnutí podkovy opět změnit tvar, tak se podkova znovu namočí do teplé vody a může se opět tvarovat.

Technická data:

- Hmotnost podkovy: **80 gramů**
- Síla materiálu: **12 mm**
- 10 konických děr na podkovák
- vnitřní svahování
- baleno v párech, dodává se v provedení přední a zadní



Možnost vložení zámku rovného, srdčitého, rozšíření ramen, ozubů nebo tvrdokovu.



Snadná tvarovatelnost. Lze vytvořit jakoukoliv ortopedickou podkovu – např. extenzi pro hříbata.



K lepení nejlépe používat originální lepidlo Esprit (za velmi výhodnou cenu). Obsahuje modrou skalici jako desinfekční prostředek a nezahřívá se jako obdobná lepidla .

Kontakt a další informace:

P.HORÁK s.r.o., Choltice 323- Podhoroky, 535 01 Choltice (okres Pardubice)
mobil: +420 777 223 829, e-mail: info@propodkovare.cz, www.propodkovare.cz

